




venome®

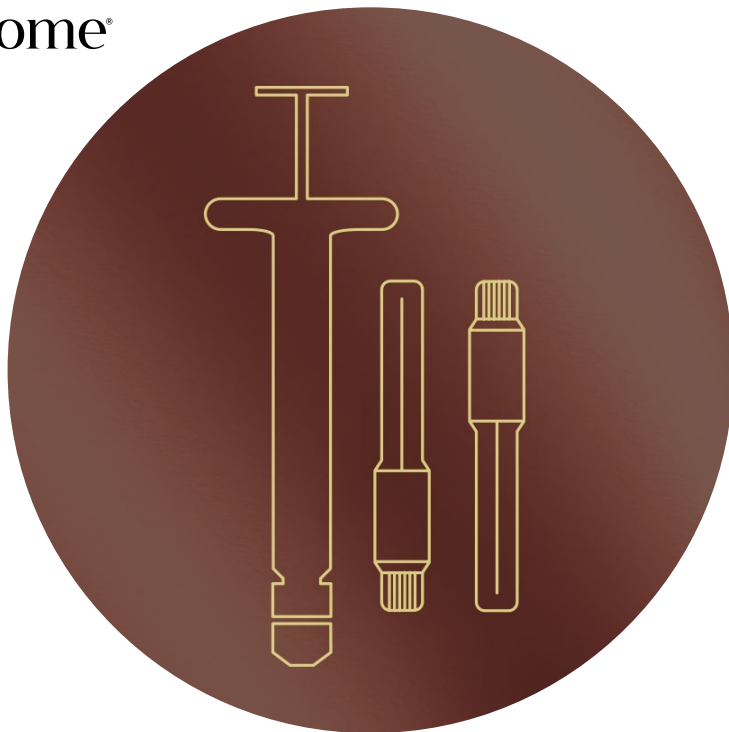


VENOME SISTHAEMA HEVO T

INTENSIVE REGENERATION UND STIMULATION DER HAUT

VENOME SISTHAEMA HEVO T

Venome SISTHAEMA HEVO T ist eine einzigartige Lösung der ästhetischen Medizin, die eine synergetische Wirkung zwischen einem Füller und einem stimulierenden Booster kombiniert. Die Zusammensetzung des Produkts ermöglicht eine vielseitige Behandlung dank seiner einzigartigen Fähigkeit, eine starke Fibroplasie des Gewebes zu aktivieren, die Zunahme der Kollagenfasern vom Typ III zu beeinflussen und die Hautfeuchtigkeit durch die Erhöhung des GAG-Levels zu verbessern.

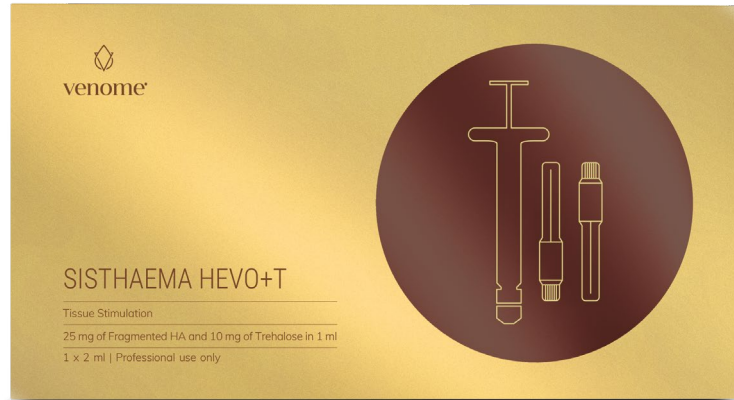

Das Produkt Venome Sisthaema ist ein Hydrogel zur intradermalen Injektion mit einer bahnbrechenden und patentierten Formulierung, die 70 mg Wirkstoffe enthält, darunter 50 mg fragmentierte Hyaluronsäure und 20 mg Trehalose, die im Vergleich zu anderen stimulierenden Formulierungen nachweislich länger im Gewebe verbleiben. Das Produkt hat ein medizinisches Zertifikat der Klasse III.

SISTHAEMIC DERMAL REGENERATION

Die Behandlung aktiviert den Prozess der Sisthaemic Dermal Regeneration, der die Aktivierung der Gewebe-Fibroplasion beinhaltet. Die Idee ist, die gezielte Teilung und Vermehrung der Fibroblasten und die Selbstregeneration zu induzieren, um das Volumen des Bindegewebes zu vergrößern. Die Hautzellen produzieren effizienter Kollagenfasern des Typs III, was zu einer natürlichen Straffung des Gewebes führt, die die Gesichtszüge harmonisch betont. Die Wirkung des Produkts hält über Wochen nach der Behandlung an und verstärkt sich mit der Zeit.

EINZIGARTIGE PATENTIERTE ZUSAMMENSETZUNG

Venome Sisthaema ist eine einzigartige Kombination aus fragmentierter Hyaluronsäure und Trehalose, die bis zu 5 Wochen lang zur Volumisierung und Tiefenhydratisierung der Haut beiträgt.

Fragmentierte Hyaluronsäure 50 mg

Venome Sisthaema basiert auf zwei Molekulargewichten von Hyaluronsäure: 1200-1500 kDa und 200-400 kDa. Die fragmentierte Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht verleiht dem Gewebe Volumen, indem sie die Kollagenproduktion vom Typ III und die starke Wasserbindung in der Dermis anregt. Die Säure mit niedrigem Molekulargewicht macht das Gel weich und die Behandlung schmerzfrei.

Die Formulierung von Sisthaema enthält Hyaluronsäurefragmente von reiner, pharmazeutischer Reinheit, die den geringsten Endotoxingehalt aufweisen, so dass die Formulierung keine Schwellungen verursacht.

INDIKATIONEN

Verlust der Straffheit

Mangelnde dichte der Haut

Schlaffe Hamster

Geringe elastizität des Gewebes

Mangelnde hydratation der Haut

Während des Herstellungsprozesses wird die Hyaluronsäure fragmentiert, d. h. die Ketten werden in kleinere Ketten verkürzt. Die Fragmentierung der langen linearen Ketten der Hyaluronsäure in die entsprechenden kurzen Elemente mit einer streng definierten Größe von 28-40 Monomeren ermöglicht es, die Produktion von Kollagen des Typs III (junges Kollagen) aufgrund seiner Fähigkeit, CD44-Rezeptoren auf Fibroblasten zu aktivieren, wirksam zu verstärken.

Neuartige Trehalose 20 mg

Die im Produkt enthaltene Trehalose, ein Disaccharid, schützt die Struktur der im Produkt enthaltenen Hyaluronsäure vor enzymatischem Abbau und Oxidation, wodurch das Produkt länger in der Haut verbleiben kann als andere Formulierungen, die auf unvernetzter Hyaluronsäure basieren. Trehalose verlängert die Wirkung des Produkts in der Dermis und sorgt so für einen effektiveren Stimulationsprozess und Verjüngungsprozess. Trehalose macht die Wirkung von Venome Sisthaema außergewöhnlich, was durch klinische Studien bestätigt wird.

WILLKOMMEN IN DER NEUEN ÄRA DER VENOME SISTHAEMIC DERMAL REGENERATION

PRODUKTIONSTECHNOLOGIE SELECTIVE SPECTRUM TECHNOLOGY

Bei Sisthaema wird die einzigartige Selective Spectrum Technology (SST) eingesetzt, ein fortschrittliches Herstellungsverfahren, das Komponenten mit unterschiedlichen Molekulargewichten und räumlichen Anordnungen identifiziert und dann diejenigen auswählt, die das Ziel (Gewebefibroplasie und Stimulation) am effektivsten erreichen und die Wirksamkeit des Endprodukts maximieren. SST ermöglicht die Auswahl von Säurefragmenten, die ein viel besseres ästhetisches Potenzial haben.

WISSENSCHAFTLICH NACHGEWIESENE WIRKUNG

Die Wirkung von SISTHAEMA HEVO T wurde mit Hilfe von PET-Scans analysiert. Dabei wurde eine physiologische Wirkung festgestellt, die keine pathologischen Entzündungen in Verbindung mit der Injektion des Produkts in den behandelten Geweben aufweist.

KONTRAINDIKATIONEN

VENOME SISTHAEMA sollte in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:


- ✗ wenn der Patient eine Neigung zur Bildung hypertropher Narben hat,
- ✗ wenn der Patient an einer Autoimmunerkrankung leidet oder sich einer Immuntherapie unterzieht,
- ✗ wenn der Patient eine Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure hat,
- ✗ wenn die Patientin schwanger ist oder stillt,
- ✗ bei Patienten unter 18 Jahren,
- ✗ Verwendung des Präparats in Kombination mit Peelings, Laser- oder Ultraschallbehandlungen,
- ✗ bei Patienten, die blutungsverlängernde Substanzen einnehmen (z. B. Acetylsalicylsäure, nicht-steroidale Antirheumatika oder Warfarin), kann es wie bei jeder Injektion zu einem erhöhten Risiko von Blutergüssen oder Blutungen an der Injektionsstelle kommen,
- ✗ bei Patienten, die Antikoagulanzen oder Thrombozytenaggregationshemmer einnehmen, sollten VENOME SISTHAEMA nicht ohne vorherige Konsultation mit Ihrem behandelnden Arzt anwenden,
- ✗ VENOME SISTHAEMA sollte nicht in Bereichen mit Entzündungen oder Hautinfektionen (z. B. Akne, Herpes usw.) verwendet werden,
- ✗ VENOME SISTHAEMA sollte nicht in Kombination mit Lasertherapie, chemischen Peelings oder Dermabrasion verwendet werden,
- ✗ nicht in Blutgefäße injizieren,
- ✗ nicht in Knochen, Sehnen, Bänder oder Muskeln injizieren,
- ✗ nicht in Muttermale injizieren,
- ✗ es gibt keine verfügbaren klinischen Daten (Wirksamkeit, Verträglichkeit) über die Anwendung von VENOME SISTHAEMA in Bereichen, in denen bereits ein anderer Füller verwendet wurde.

NEBENWIRKUNGEN

Entzündungsreaktionen (Rötung, Schwellung, Erythem), die mit Juckreiz oder Druckempfindlichkeit nach der Injektion einhergehen können. Diese Reaktionen können bis zu einer Woche andauern.

Verdickungen oder Klumpen an der Injektionsstelle, insbesondere bei zu oberflächlicher Verabreichung.

Verfärbungen an der Injektionsstelle.

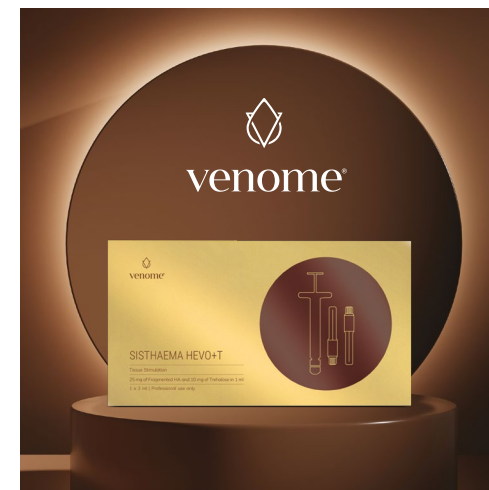

VENOME SISTHAEMA BEHANDLUNGSPROTOKOLL

Venome SISTHAEMA kann mit mehreren Methoden injiziert werden, sowohl mit der linearen Technik als auch mit der Mesotherapie, der 5-Punkt- und der TENSE-Technik, jeweils bis zu einer Tiefe der Dermis von 1,6-2,0 mm.

SISTHAEMA kann sowohl im Gesichtsbereich als auch an Händen und Hals oder am Körper injiziert werden.

DIE TENSE-TECHNIK wurde entwickelt, um die straffenden und regenerierenden Eigenschaften des Produkts zu verbessern.

Mit der **Tense-Technik** können **9 lineare Vektoren** durchgeführt werden.

1 WEKTOR vom Ohrknorpel,


2 WEKTOR enthält 3 Linien vom Kieferwinkel,

3 WEKTOR enthält 2 Linien (ein Punkt vom äußeren Augenwinkel und der Nasenflügel),

4 WEKTOR Nasolabialfalte,

5 WEKTOR Marionette Linie,

6 WEKTOR untere Teil des Kinns, jeder Vektor (Punkt) in der linear rückwärts Technik hinterlässt Depots von 0,1 ml, mit Ausnahme der Vektoren 4 und 1, die jeweils 0,15 ml enthalten.

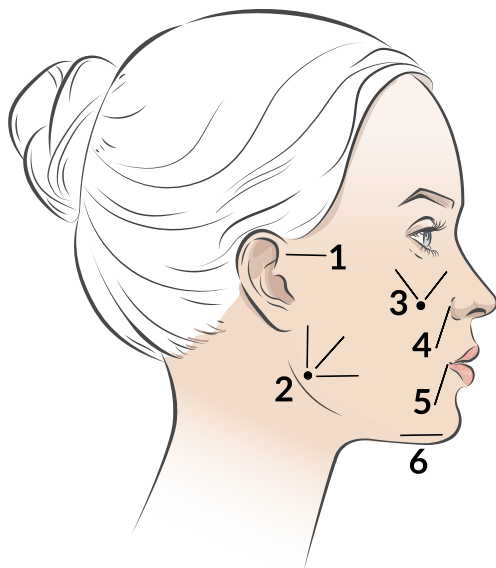

HÄUFIGKEIT DER BEHANDLUNGEN

Gesicht, Hals, Dekolleté, Hände
- alle **15-30 Tage** in Sitzungen von **4-5 Wiederholungen**

DIE 2 ML AMPULLENSPRITZE ENTHÄLT

Nicht vernetzte Hyaluronsäure 50 mg

Trehalose 20 mg

2 Nadeln 30 G

5-PUNKT TECHNIK

Bei der 5-Punkt-Technik wird die Nadel senkrecht in die tiefen Schichten der Dermis eingeführt und hinterlässt pro Punkt 0,1-0,3 ml.

Die Punkte sollten an 5 Stellen auf der einen und auf der anderen Seite des Gesichts platziert werden.


1 PUNKT - 2 cm unterhalb des äußeren Augenwinkels auf der Linie, die den Winkel des Kiefers verbindet

2 PUNKT - 1 cm seitlich von der Nasenflügel

3 PUNKT - 1 cm in einer geraden Linie von der Ohrknorpel

4 PUNKT - 2 cm nach unten und 1 cm medial von der Linie, die vom äußeren Winkel des Lippenrots nach unten gezogen ist

5 PUNKT - 1,5 cm medial und oben vom Winkel des Kiefers.

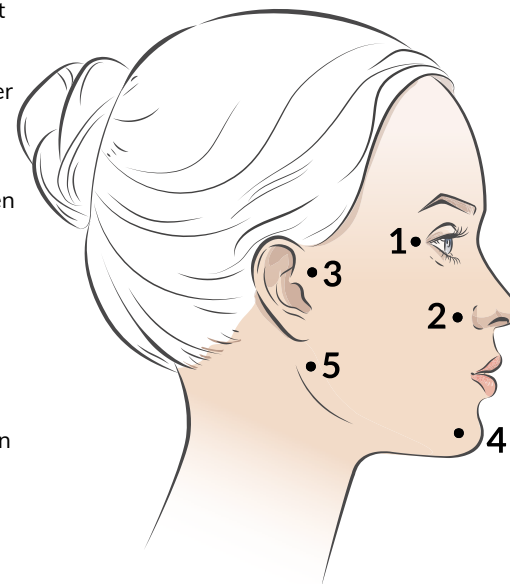



venome®

✉ office@venome-global.com

 [@venomeofficial](https://www.facebook.com/venomeofficial)

 www.venome-global.com