

Empfehlungen

Nicht verwenden, wenn das Fläschchen in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Der Inhalt des Fläschchens muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden.

Bei 2°C-30°C lagern.

Das Produkt ist für den Gebrauch durch einen Fachmann bestimmt.

Kontraindikationen/Nebenwirkungen

Enthält Kollagen tierischen Ursprungs aus einer Schweinequelle.

Patienten, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts festgestellt wird, sollten jedoch vor der Anwendung durch topische Injektion in den Arm getestet und 1 Stunde lang beobachtet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Leichte Rötungen im Injektionsbereich können durch die mechanische Wirkung des Nadeleinstichs oder durch eine Hautreaktion entstehen. Während der Anwendung können Brennen/Schmerzen an der Injektionsstelle auftreten, die normalerweise innerhalb von 5-10 Minuten nach der Behandlung spontan abklingen.

Vor und nach der Verabreichung ist eine Hautreinigung/Desinfektion erforderlich. Abszessbildende Bakterien können zur Bildung eines Abszesses im Injektionsbereich führen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KLEINKINDERN AUFBEWAHREN.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf Produkte, die ordnungsgemäß in der unbeschädigten Originalverpackung aufbewahrt werden.

Nach dem Öffnen ist das Produkt sofort zu verwenden.

Hinweise zur Anwendung

MD-Muscle kann allein oder in Kombination mit anderen Medizinprodukten aus demselben Sortiment verwendet werden, um die Behandlung je nach klinischer Situation entsprechend anzupassen.

Das Produkt kann bei Patienten verwendet werden, die eine Kollagenergänzung oder eine topische Anti-Falten-Therapie benötigen.