

### **Kontraindikationen**

- Die Anwendung von PolyPhil hair ist kontraindiziert bei Personen mit bekannter individueller Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen des Produkts oder bei positiver Anamnese einer Allergie gegen Fischprodukte.
- Da keine klinischen Daten zur Anwendung des Produkts bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen, bei schwangeren und stillenden Frauen sowie bei Personen unter 18 Jahren vorliegen, wird die Behandlung mit PolyPhil hair in diesen Fällen nicht empfohlen.

### **Vorsichtsmaßnahmen**

- Nicht geeignet für andere Injektionsarten als die intradermale Anwendung.
- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht erneut sterilisieren. Nach Gebrauch gemäß den anerkannten medizinischen Praktiken und den geltenden Vorschriften entsorgen.

### **Nebenwirkungen**

- Die mechanische Wirkung der Nadel kann das Auftreten kleiner Blutergüsse verursachen.
- In seltenen Fällen können im behandelten Bereich Reaktionen auftreten, die für alle Injektionstypen typisch sind, wie Schwellungen, Rötungen sowie ein Wärme- oder Schmerzgefühl.
- Zur Beschleunigung des Heilungsprozesses kann auf den behandelten Bereich eine Kühlkomresse aufgelegt werden.
- Diese Reaktionen klingen in der Regel innerhalb weniger Tage ab. Sollten die Symptome anhalten, ist ein Arzt zu konsultieren.
- Der Arzt sollte sicherstellen, dass die Patienten ihn über alle unerwünschten Reaktionen informieren, die nach der Behandlung auftreten.