
Kontraindikationen

Es sollte nicht angewendet werden bei:

- Allergien gegen Hyaluronsäure, Lidocainhydrochlorid oder andere Lokalanästhetika vom Amidtyp;
- Autoimmunerkrankungen oder während einer Immuntherapie;
- Akuten Entzündungen der Haut an der geplanten Injektionsstelle (z. B. Akne);
- Grippe und akuter Erkältung mit Fieber;
- Akuter systemischer Infektion (Herpes, Psoriasis);
- Blutgerinnungsstörungen;
- Neigung zur Narbenbildung;
- Schwangerschaft und Stillzeit;
- Alter unter 18 Jahren;

Venome Filler Lido darf nicht injiziert werden in:

- Blutgefäße,
- Gelenke,
- Brüste.

Die Anwendung des Präparats wird nicht empfohlen:

Bei Behandlungen im Bereich der Augenhöhlen und bei quer verlaufenden Stirnfalten.